

Wash-Checks REF FC-401/402/403



Evaluierung der Reinigungsleistung in RDG mit Wash-Checks

- Wash-Checks Indikatorplättchen (FC-401) seitlich in die Wash-Checks-Halterung (FC-402) vollständig einschieben. Dabei darauf achten, dass die Vorderseite des Indikatorplättchens mit der roten Testanschmutzung nach Außen zeigt, d.h. ein Teil der roten Testanschmutzung muss im offenen Teil der Halterung sichtbar bleiben.
- 6 Wash-Checks-Halterungen mit Indikatorplättchen in die vorher definierten Positionen am Rand der Siebschalen im RDG einhängen, z. B. bei 3 Ebenen im RDG 2 Wash-Checks-Halterungen mit Indikatorplättchen je Ebene. Die offene Vorderseite der Halterung zeigt dabei in das Innere des RDG, um bei ordnungsgemäßem Betrieb im Reinigungszyklus einen direkten Zutritt von Wasser und Reiniger zu ermöglichen.
- Reinigungsprogramm starten und Zyklus vollständig durchführen.
- Wash-Checks-Halterungen mit Wash-Checks Indikatoren nach Ablauf des Zyklus aus dem RDG nehmen und Indikatorplättchen auf Entfernung der roten Testanschmutzung prüfen.
- Positionen (1-6) und Testergebnisse der Wash-Checks Reinigungsindikatoren dokumentieren.

Beispiel für Positionierung der Wash-Checks-Halterungen bei 3 Ebenen im RDG und 2 Siebschalen je Ebene:

